


Инструкция по снятию замеров для определения размера аппарата SWASH

1. Объем талии.


- а) объем талии на уровне пупка в положении сидя.
 б) можно сделать обмер в положении лежа, тогда необходимо предусмотреть запас, чтобы под ленту проходила ладонь взрослого человека.

Для верности лучше замерить двумя разными способами и сообщить нам оба результата.

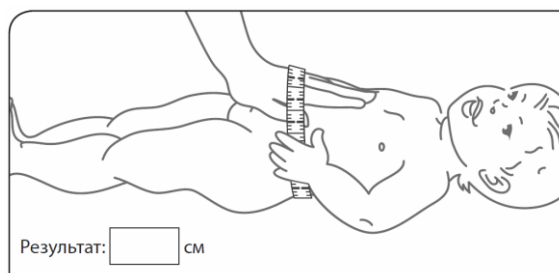

2. Объем бедра.

В положении лежа длина бедра от паха до коленной чашечки делится на 3 части, замеряется толщина бедра по верхней границе нижней трети, к мерке прибавляется 1 см.

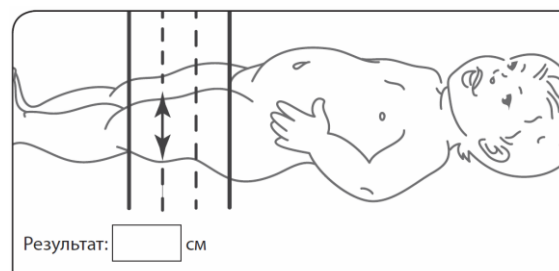

3. Длина бедра.

В положении лежа длина от проекции уровня пупка до середины коленной чашечки по боковой (лампасной) линии.

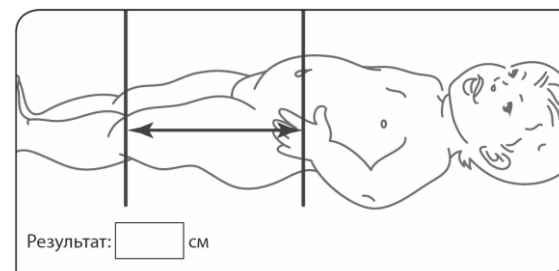


Таблица определения размера

Размеры, мм		Полукорсет (окружность)	Манжеты (окружность)	Стержни соединительные	
				длина	толщина
SWASH® CLASSIC	Размер 1	400-465	210-250	310	6
	Размер 1A		210-250		7
	Размер 2	460-550	250-290	375	7
	Размер 3	540-630	290-330	440	7
	Размер 4	620-720	330-380	480	7
SWASH® LOW PROFILE II	Размер 1	400-465	210-250	310	8
	Размер 2	460-550	250-290	375	8
	Размер 3	540-630	290-330	440	8
	Размер 4	620-720	330-380	480	8
	Размер 5	710-810	380-440	540	8
	Размер 6	800-900	440-500	600	8